

## **WSKAZANIA:**

### **Kryteria kwalifikujące pacjenta do podłączenia Eversense**

1. Cukrzyca
2. Skończone 18 lat

## **PRZECIWWSKAZANIA:**

1. Wiek poniżej 18 lat
2. Ciąża i karmienie piersią
3. Wymagane lub planowane badanie rezonansem magnetycznym, jeżeli zachodzi potrzeba wykonania badania należy usunąć czujnik
4. Osoba ciężko chora lub w trakcie hospitalizacji
5. Przeciwwskazania do stosowania deksametazonu oraz octanu deksametazonu
6. Przyjmowanie dożylnie mannitolu

### **System Eversense nie był przebadany w następujących populacjach:**

1. U kobiet w ciąży, kobiet karmiących
2. U osób poniżej 18 roku życia
3. U osób ciężko chorych i w trakcie hospitalizacji
4. U osób przyjmujących terapię immunosupresyjną
5. U osób poddawanych chemioterapii lub terapii antykoagulacyjnej
6. U osób ze wszczepionym defibrylatorem (dopuszczalne są bierne implanty np. stentysercowe)
7. U osób ze stwierdzoną alergią na glikokortykosteroidy stosowane ogólnoustrojowo (w tym podawane w postaci wziewnej, ale z wyłączeniem stosowanych miejscowo, do oczu lub nosa).

## **WAŻNE:**

1. Zawsze należy zdjąć nadajnik przed poddaniem się badaniu RTG - zdjęcie rentgenowskie oraz TK - tomografii komputerowej
2. Duża dawka aspiryny >2000 mg może mieć wpływ na pomiar glukozy czujnika

Przed podjęciem decyzji o terapii z użyciem systemu EVERSENSE CGM należy skonsultować wskazania i przeciwwskazania z lekarzem prowadzącym.